



Monikäyttövyö

Asennusohjeet ja käyttöohjeet

[Asennusohje monikäyttövyö]



Monikäyttövyö
elastinen tarravyö



[Varoitus]

Tutustu huolellisesti ja ymmärrä tässä ohjeessa olevat tiedot ennen tämän tuotteen käyttöä. Jos tässä tuoteoppaassa olevia menettelyjä ja ohjeita ei noudateta, se voi aiheuttaa käyttäjälle vakavia vammoja

- 1) **VAROITUS!** Tämä tuote on määrättävä ja asennettava pätevien ammattilaisten toimesta
- 2) **VAROITUS!** Kaikki vyöt on suunniteltu vain asennonsäätöön ja yksilöllisen turvallisuuden takaamiseen, ei keinona estää liikkumista. Käyttäjien on jatkettava säännöllisiä paineenpuristusharjoituksia ja ihon eheyden tarkistuksia, ei vain siellä, missä tämä tuote on yhteydessä, vaan myös ensisijaisissa painealueissa, kuten ristiluussa, jaloissa ja pakaroissa. Jos ihon punoitus tai ärsytys lisääntyy, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriisi tai istuma-asiantuntijaan. Lisäksi tuotteita on säädettävä säännöllisesti käyttäjien kasvun, vaatteiden vaihteluiden tai vamman vaatimusten mukaan.
- 3) **VAROITUS!** Tämän tuotteen tahaton irtoaminen voi aiheuttaa käyttäjän liukumisen alas tai putoamisen
- 4) **VAROITUS!** Jos käyttäjä jää hätätilanteessa jumiin kävelytelineeseen, voi olla vaarallista, jos käyttäjä ei pysty itse vapautumaan
- 5) **VAROITUS!** Jos käyttäjän fyysiset tai kognitiiviset kyvyt estävät häntä käyttämästä vyötä turvallisesti, tulee hoitajan olla läsnä aina käytön aikana. Varmista, että kaikki hoitajat osaavat säätää ja irrottaa tuotteen asianmukaisesti.
- 6) **VAROITUS!** Tämän tuotteen on istuttava asianmukaisesti tukemaan käyttäjän kehoa vahingoittamatta käyttäjää.
- 7) **VAROITUS!** Tukehtumisvaaran vuoksi tämän tuotteen käyttö ilman lantion tukea on vaarallinen. Käytä aina yhdessä asianmukaisesti sovitetun lantiotuen kanssa..

[Asennus]

A) Pakkauksen sisältö

- Monikäyttövyö

B) SIIJOITTELU Monikäyttövyö on suunniteltu joustavaa ja tilapäistä asennon tukea varten, mahdollistaen sopeutumisen erilaisiin asentoihin käyttäjän tarpeiden mukaan. Pitkäaikaisiin ja yksilöllisiin asennon ratkaisuihin suositellaan ammattilaisten määräämiä yksilöllisempiä tuotteita.





Monikäyttövyö

Asennusohjeet ja käyttöohjeet

C) SÄÄTÖ

Jos universaali elastinen hihna on käyttäjälle liian pitkä, voit leikata sen Velcro-sivusta pois, jotta saat halutun pituuden oikean istuvuuden saavuttamiseksi.



VAROITUS! Jos vyöt ovat liian löysät, käyttäjän liukastumisvaara ja putoamis- tai kuristumisvaara voi olla olemassa.

D) TURVALLISUUSTARKASTUS

Kun asetat käyttäjän pyörätuoliin, varmista, että hän nojaa eteenpäin ja sivuille istuvuuden arvioimiseksi. Tarkista seuraavat asiat:

Tarkista seuraavat asiat:

1. Mukavuus: Jos vyöt hankaavat, aseta ne uudelleen.
2. Asento: Jos vyöt ovat liian korkealla tai liian matalalla, säädä niiden korkeutta tai syvyyttä. Älä käytä tätä vyötä rinnan yläpuolella, esim. harteilla, kaulassa jne.
3. Häiriö muille laitteille: Siirrä vyöt, jos ne estävät käsinoja, lisäpehmusteita tai ruokintaletkuja.
4. Toiminta: Liikutele tuolia sen koko liikealueella, joka sisältää kallistuksen, taantumisen ja pyörimisen. Varmista, että mikään ei ole liikkeen tiellä tai aiheuta häiriötä

[Käyttö tarkoitus]

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan henkilön asennon korjaamiseen pyörätuolissa. Älä käytä tätä tuotetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sen tarkoitukseen

[Huolto]:

Tarkista tämä tuote säännöllisesti ompeleiden, nauhojen ja pehmusteiden kulumisen varalta. Poista tämä tuote välittömästi käytöstä, kun mikä tahansa kunto heikkenee, joka saattaisi tehdä sen käytön turvattomaksi, ja ota yhteyttä toimittajaasi pätevään korjaukseen tai vaihtoon. Älä muuta tai korjaa tuotetta itse. Asiakkaat, jotka muuttavat tai muokkaavat tuotteitamme, tekevät sen omalla vastuullaan.

[Puhdistaminen]:

Lämmin konepesu 40° C. Kuivausrummussa matalassa lämpötilassa tai anna kuivua huoneen lämmössä. Älä käytä valkaisuainetta tai silitä. Aseta vyö pesupussiin estääksesi turvavälineen tai pesukoneen/kuivausrummun vaurioitumisen.



[Takuuehdot]

Tällä tuotteella on 1 vuoden takuu ostopäivästä, ja takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Tämä takuu ei kuitenkaan kata väärinkäyttöä tai laiminlyöntiä, eikä normaalia kulumista.

[Hävittäminen]

Kun tuote saavuttaa elinkaarensa lopun, se tulisi lajitella materiaalityypin mukaan, jotta osat voidaan kierrättää ja hävittää turvallisesti.