




MD

Kiinnitysvaljaat

Asennus- ja käyttöohje

[Jalkavöiden asennus]

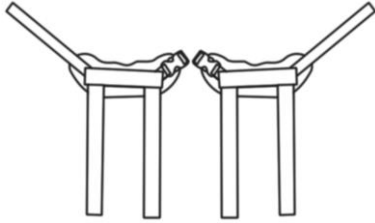

Nilkkahihna



Varvashihna




PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Nilkkahihnat, varvashihnat (molemmat tuotteet eivät välttämättä sisälly)


Vaihe1: Aseta nilkkahihnat tai varvashihnat potilaan nilkkaan ja jalkaan. Määritä säätöhihnan pituus. Pujota hihnat vastaaviin jalkalevyn reikiin (kuten kuvassa).



Vaihe2: Noudata alla olevia kaavioita säätöhihnan kiinnittämiseksi.

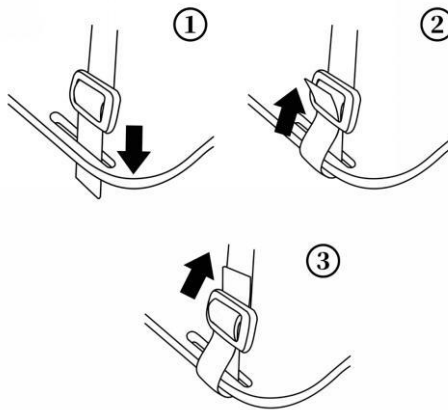

Vaihe3: Kiinnitä nilkkahihna soljen avulla ja säädä hihnaa vetämällä vapaata päätä niin, että hihna on napakasti nilkan ja jalan ympärillä. **Ole varovainen, ettet kiristä liikaa.**

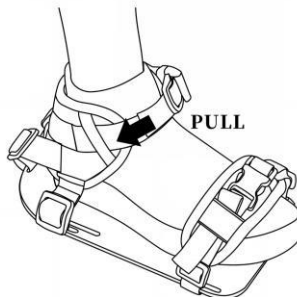

Välttääksesi tarpeetonta hiertymistä, suosittelemme käyttämään jalkavyön suojaa nilkkasukkien tai tavallisen jalkineiden päällä




MD

Kiinnitysvaljaat

Asennus- ja käyttöohjeet

[Lukon vapautus]

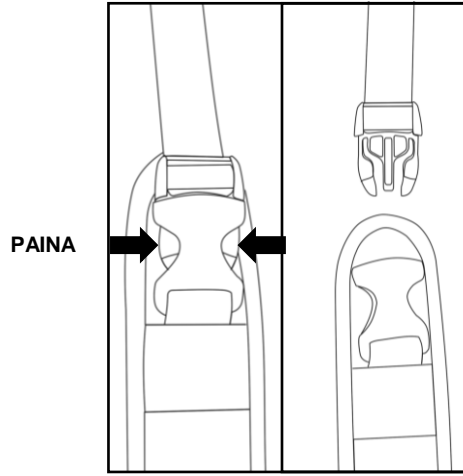

Muovilukko



[Varoitus]

Lue tämän ohjeen tiedot huolellisesti ja ymmärrä ne ennen kuin käytät tätä tuotetta. Jos tämän tuotteen ohjeita ei noudateta, se voi aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle.

1) **VAROITUS!** Tämän tuotteen tulee olla määrätty ja asennettu ammattilaisten toimesta.

2) **VAROITUS!** Kaikki turvavyöt on suunniteltu ainoastaan asennon korjaamista ja käyttäjän turvallisuuden varmistamista varten, eikä niitä tule käyttää pakkokeinona. Käyttäjän tulee jatkaa säännöllistä paineenlievitystoimintaa ja tarkastaa ihon kunto ei pelkästään paikoissa, joissa tuote on käytössä, vaan myös niissä paikoissa, joissa painetta syntyy eniten, kuten ristiselässä, jaloissa ja pakaroissa. Jos iholla esiintyy lisääntyneitä punoitusta tai ärsytystä, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai istuinten asiantuntijaan. Tuotetta on myös säädettävä säännöllisesti käyttäjän kasvun, vaatteiden muutosten tai vammaisuuden vaatimusten mukaisesti.

3) **VAOITUS!** Tämä tuote tulee kiinnittää ensimmäiseksi ja olla viimeinen tuote, joka vapautetaan tai poistetaan

4) **VAROITUS!** Jos käyttäjä joutuu hätätilanteeseen ja on jumissa pyörätuolissa, voi olla vaarallista, jos hän ei pysty vapauttamaan itseään siitä.

5) **VAROITUS!** Jos käyttäjän fyysiset tai kognitiiviset kyvyt estävät turvavaljaiden turvallisen käytön, hoitajan on oltava läsnä koko käytön ajan. Varmista, että kaikki hoitajat tietävät, miten tuotetta säädetään ja avataan oikein.

[Huolto]:

Tarkista tämä tuote säännöllisesti solkien, ompeleiden, nauhojen ja pehmusteiden kulumisen varalta. Poista tämä tuote välittömästi käytöstä, kun mikä tahansa kunto heikkenee, joka saattaisi tehdä sen käytön turvattomaksi, ja ota yhteyttä toimittajaasi pätevään korjaukseen tai vaihtoon. Älä muuta tai korjaa tuotetta itse. Asiakkaat, jotka muuttavat tai muokkaavat tuotteitamme, tekevät sen omalla vastuullaan.

[Puhdistaminen]:

Lämminkonepesu 60° C (140° F). Kuivausrummussa matalassa lämpötilassa tai anna kuivua huoneen lämmössä. Älä käytä valkaisuainetta tai silitä. Aseta turvavaljaat tai -vyö pesupussiin estääksesi turvavälineen tai pesukoneen/kuivausrummun vaurioitumisen.



[Takuehdot]:

Tällä tuotteella on 5 vuoden takuu ostopäivästä, ja takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Tämä takuu ei kuitenkaan kata omistajan väärinkäyttöä tai laiminlyöntiä, eikä normaalia kulumista.

[Hävittäminen]:

Kun tuote saavuttaa elinkaarensa lopun, se tulisi lajitella materiaalityypin mukaan, jotta osat voidaan kierrättää ja hävittää turvallisesti.

[Käyttö tarkoitus]

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan henkilön asennon korjaamiseen pyörätuolissa. Älä käytä tätä tuotetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sen tarkoitukseen.