



MD

# Kiinnitysvaljaat

## Asennus- ja käyttöohjeet

### [Ylävartalon kiinnitysvaljaiden asennus]



Muotoillut olkavaljaat



Perus olkavaljaat



Perus olkavaljaat vetoketjulla



H-olkavaljaat



Reppuvaljaat




Y-valjaat

#### A) PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Olkavaljaat
- Kiinnitystarvikkeet

#### B) ASENNUSVAATIMUKSET

1. Pyörätuoli tai istuin, jossa on tukeva selkätuki.
2. Kiinnitysruuvit, Ø5-6mm (3/16 - 1/4"), joissa on vähintään 90kg / 200lb vetokestävyys.

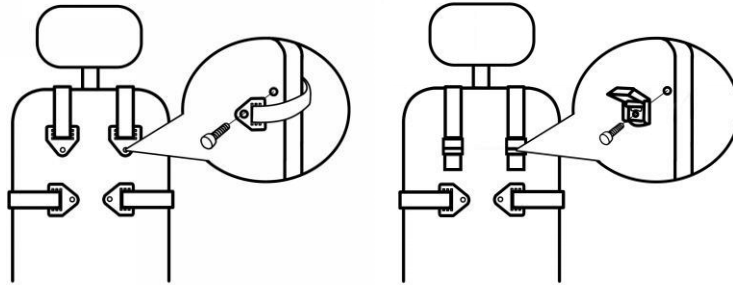

Vaihtoehtoinen asennus  
(saatavilla käyttäjille, joiden paino on enintään 75 kg)

#### C) ASENNUSVAIHEET:

- Vaihe 1. Varmista, että pyörätuolin käyttäjä istuu oikeassa asennossa.
- Vaihe 2. Aseta olkavöiden pehmusteet rintalastan päälle ja vie yläremmit olkapäiden yli. Aseta sitten alempia remmejä vatsan kohdalle.
- Vaihe 3. Kiinnitä ylä- ja alaremmet selkänokkaan kiinnitystarvikkeilla.
- Vaihe 4. Säädä valjaiden sijaintia ylös/alas, jotta paine jakautuu tasaisesti kylkiluiden ja olkapäiden yli.

#### D) TARKASTUS

Kun käyttäjä on oikeassa asennossa pyörätuolissa, pyydä käyttäjää kallistumaan eteenpäin ja tarkista, että valjaat istuvat hyvin.

Tarkista seuraavat:

Soljet ja säätöremmit toimivat normaalisti.

Mukavuus: Jos valjaat hankautuvat käyttäjän niska vasten, siirrä yläremmit.

Sijainti: Jos valjaiden pehmusteet ovat liian korkealla tai matalalla, säädä remmejä.



Oikein



Liian kireällä



Jos valjaita on säädetty liian tiukalle, se voi rajoittaa hengitystä ja lisätä painetta olkapäiden ja rinnan alueelle.



Liian alhaalla



Jos valjaat on säädetty liian löysäksi, ne eivät pysty täyttämään tarkoitustaan, ja ne voivat antaa käyttäjän valua alaspäin, mikä voi aiheuttaa kuristumisvaaran.




MD


# Kiinnitysvaljaat

## Asennus- ja käyttöohjeet


### [Lukon vapautus]

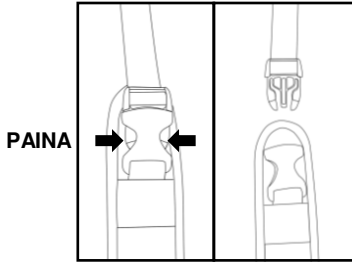

Muovilukko

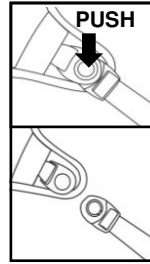

Muovinen pyörivä solki

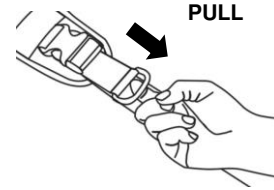

Vedä D-renkaasta sääätäksesi hihnan pituutta.



①



②



③



④

Metalliset kiinnitysosat asennetaan kuvassa esitetyllä tavalla.



### [ Varoitus ]

Lue tämän ohjeen tiedot huolellisesti ja ymmärrä ne ennen kuin käytät tätä tuotetta. Jos tämän tuotteen ohjeita ei noudateta, se voi aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle.

1) **VAROITUS!** Tämän tuotteen tulee olla määrätty ja asennettu ammattilaisten toimesta.

2) **VAROITUS!** Kaikki valjaat on suunniteltu ainoastaan asennon korjaamista ja käyttäjän turvallisuuden varmistamista varten, eikä niitä tule käyttää pakkokeinona. Käyttäjän tulee jatkaa säännöllistä paineenlievitystoimintaa ja tarkastaa ihon kunto ei pelkästään paikoissa, joissa tuote on käytössä, vaan myös niissä paikoissa, joissa painetta syntyy eniten, kuten ristiselässä, jaloissa ja pakaroissa. Jos iholla esiintyy lisääntynyttä punoitusta tai ärsytystä, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai istuinten asiantuntijaan. Tuotetta on myös säädettävä säännöllisesti käyttäjän kasvun, vaatteiden muutosten tai vammaisuuden vaatimusten mukaisesti.

3) **VAROITUS!** Tämä tuote tulee kiinnittää ensimmäiseksi pyörätuoliin ja olla viimeinen tuote, joka vapautetaan tai poistetaan, ennen kuin käyttäjä poistuu pyörätuolista. Tämän tuotteen vahingossa tapahtuva irtoaminen voi mahdollistaa käyttäjän liukumisen alaspäin tai kaatumisen eteenpäin.

4) **VAROITUS!** Jos käyttäjä joutuu hätätilanteeseen ja on jumissa pyörätuolissa, voi olla vaarallista, jos hän ei pysty vapauttamaan itseään siitä.

5) **VAROITUS!** Jos käyttäjän fyysiset tai kognitiiviset kyvyt estävät turvavaljaiden turvallisen käytön, hoitajan on oltava läsnä koko käytön ajan. Varmista, että kaikki hoitajat tietävät, miten tuotetta säädetään ja avataan oikein.

6) **VAROITUS!** Nämä valjaat on asennettava oikein käyttäjälle

### [ Huolto ]:

Tarkista tämä tuote säännöllisesti solkien, ompeleiden, nauhojen ja pehmusteiden kulumisen varalta. Poista tämä tuote välittömästi käytöstä, kun mikä tahansa kunto heikkenee, joka saattaisi tehdä sen käytön turvattomaksi, ja ota yhteyttä toimittajaasi pätevään korjaukseen tai vaihtoon. Älä muuta tai korjaa tuotetta itse. Asiakkaat, jotka muuttavat tai muokkaavat tuotteitamme, tekevät sen omalla vastuullaan.

### [ Puhdistaminen ]:

Lämminkonepesu 60° C (140° F). Kuivausrummussa matalassa lämpötilassa tai anna kuivua huoneen lämmössä. Älä käytä valkaisuainetta tai siilitä. Aseta turvavaljaat tai -vyö pesupussiin estääksesi turvavälilinen tai pesukoneen/kuivausrummun vaurioitumisen.



### [ Takuuehdot ]:

Tällä tuotteella on 5 vuoden takuu ostopäivästä, ja takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Tämä takuu ei kuitenkaan kata omistajan väärinkäyttöä tai laiminlyöntiä, eikä normaalia kulumista.

### [ Hävittäminen ]:

Kun tuote saavuttaa elinkaarensa lopun, se tulisi lajitella materiaalityypin mukaan, jotta osat voidaan kierrättää ja hävittää turvallisesti.

### [ Käyttötarkoitus ]

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan henkilön asennon korjaamiseen pyörätuolissa. Älä käytä tätä tuotetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sen tarkoitukseen.