



MD

Kiinnitysvaljaat

Asennus- ja käyttöohjeet

[Ylävartalon vyön asennus]



Rintavyö



Tarranauha rintavyö

A) PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


- Rintavyö.
- Kiinnitystarvikkeet.

B) ASENUS JA KIINNITYS


1. Varmista, että pyörätuolin käyttäjä istuu oikeassa asennossa.

2. Aseta vyö rintalastan päälle ja kiinnitä hihnat rungon kautta selkänojaan.


Kiinnityskohtaa valitessa on tärkeää harkita muiden mahdollisten laitteiden aiheuttamaa häiriötä. On neljä eri kiinnitystapaa, katso alla olevat kuvat:

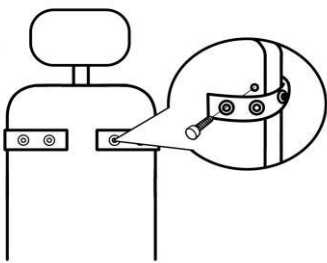


Kiinnitystapa 1

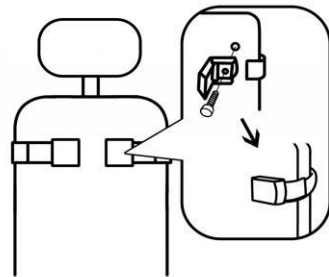

Kiinnitystapa 2

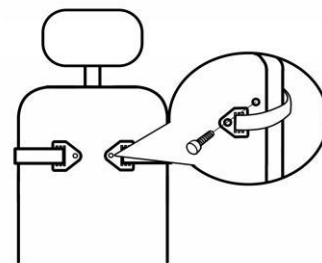

Kiinnitystapa 3

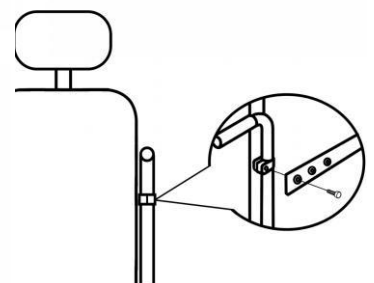

Kiinnitystapa 4

C) SÄÄTÖ

Kun käyttäjä istuu oikeassa asennossa, tarkista vyön istuvuus. Sen tulee olla napakka käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi. Pieniä säätöjä voidaan tehdä käyttämällä D-renkaan kiristyshihnoja. Suuria säätöjä istuvuudessa voidaan tehdä käyttämällä kiinnityshihnoja."

D) TARKASTUS

Kun käyttäjä on oikeassa asennossa pyörätuolissa, pyydä häntä kallistumaan eteenpäin ja tarkista, että rintavyö sopii hyvin.

Tarkista seuraavat asiat:

- 1) Lukot ja säätöhihnat toimivat normaalisti.
- 2) Mukavuus: Jos vyö hiertää käyttäjän rintaa, siirrä hihnat ja pidä rintavyö napakasti kiinni. Jos vyö on liian löysä, se voi mahdollistaa käyttäjän liukumisen alaspäin ja aiheuttaa riskejä kuristumiselle.
- 3) Korkeus: Jos rintavyö on liian korkealla tai matalalla, säädä vyö.




MD


Kiinnitysvaljaat

Asennus- ja käyttöohjeet

[Lukon vapautus]

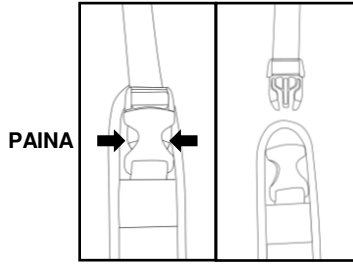

Muovilukko

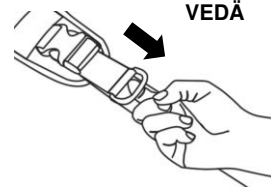

Vedä D-renkaasta säättääksesi hihnan pituutta.



①



②



③



④

Metalliset kiinnikkeet on asennettu kuvan mukaisesti



[Varoitus]

Lue tämän ohjeen tiedot huolellisesti ja ymmärrä ne ennen kuin käytät tätä tuotetta. Jos tämän tuotteen ohjeita ei noudateta, se voi aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle.

1) **VAROITUS!** Tämän tuotteen tulee olla määrätty ja asennettu ammattilaisten toimesta.

2) **VAROITUS!** Kaikki turvavyöt on suunniteltu ainoastaan asennon korjaamista ja käyttäjän turvallisuuden varmistamista varten, eikä niitä tule käyttää pakkokeinona. Käyttäjän tulee jatkaa säännöllistä paineenlievitystoimintaa ja tarkastaa ihon kunto ei pelkästään paikoissa, joissa tuote on käytössä, vaan myös niissä paikoissa, joissa painetta syntyy eniten, kuten ristiselässä, jaloissa ja pakaroissa. Jos iholla esiintyy lisääntynyttä punoitusta tai ärsytystä, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai istuinten asiantuntijaan. Tuotetta on myös säädettävä säännöllisesti käyttäjän kasvun, vaatteiden muutosten tai vammaisuuden vaatimusten mukaisesti.

3) **VAROITUS!** Tämä tuote tulee kiinnittää ensimmäiseksi pyörätuoliin ja olla viimeinen tuote, joka vapautetaan tai poistetaan, ennen kuin käyttäjä poistuu pyörätuolista. Tämän tuotteen vahingossa tapahtuva irtoaminen voi mahdollistaa käyttäjän liukumisen alaspäin tai kaatumisen eteenpäin.

4) **VAROITUS!** Jos käyttäjä joutuu hätätilanteeseen ja on jumissa pyörätuolissa, voi olla vaarallista, jos hän ei pysty vapauttamaan itseään siitä.

5) **VAROITUS!** Jos käyttäjän fyysiset tai kognitiiviset kyvyt estävät turvavaljaiden turvallisen käytön, hoitajan on oltava läsnä koko käytön ajan. Varmista, että kaikki hoitajat tietävät, miten tuotetta säädetään ja avataan oikein.

6) **VAROITUS!** Rintavyön on oltava oikein asennettuna, tukemaan käyttäjän vartaloa ja hartioita aiheuttamatta vahinkoa.

[Huolto]:

Tarkista tämä tuote säännöllisesti solkien, ompeleiden, nauhojen ja pehmusteiden kulumisen varalta. Poista tämä tuote välittömästi käytöstä, kun mikä tahansa kunto heikkenee, joka saattaisi tehdä sen käytön turvattomaksi, ja ota yhteyttä toimittajaasi pätevään korjaukseen tai vaihtoon. Älä muuta tai korjaa tuotetta itse. Asiakkaat, jotka muuttavat tai muokkaavat tuotteitamme, tekevät sen omalla vastuullaan.

[Puhdistaminen]:

Lämminkonepesu 60° C (140° F). Kuivausrummussa matalassa lämpötilassa tai anna kuivua huoneen lämmössä. Älä käytä valkaisuainetta tai siilitä. Aseta turvavaljaat tai -vyö pesupussiin estääksesi turvavälimeen tai pesukoneen/kuivausrummun vaurioitumisen



[Takuuehdot]:

Tällä tuotteella on 5 vuoden takuu ostopäivästä, ja takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Tämä takuu ei kuitenkaan kata omistajan väärinkäyttöä tai laiminlyöntiä, eikä normaalia kulumista.

[Hävittäminen]:

Kun tuote saavuttaa elinkaarensa lopun, se tulisi lajitella materiaalityypin mukaan, jotta osat voidaan kierrättää ja hävittää turvallisesti.

[Käyttötarkoitus]

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan henkilön asennon korjaamiseen pyörätuolissa. Älä käytä tätä tuotetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sen tarkoitukseen.